

Produktinformation: 22511

Steckbeckenreiniger

- wirkungsvoller, materialschonender Steckbeckenreiniger mit hoher Schmutzlösewirkung
- zur effektiven Reinigung von Urinflaschen, Steckbecken und Bettpfannen
- geeignet für alle thermischen Steckbeckenspülautomaten
- Medizinprodukt - CE-zertifiziert



RHEOSOL-STR Steckbeckenreiniger

Spezialreiniger für Steckbecken-Spülautomaten

Produktbeschreibung

Wirkungsvolles, materialschonendes Spülmittel. Mit hoher Schmutzlösewirkung. Zur Reinigung von Steckbecken, Bettpfannen und Urinflaschen. In Reinigungsautomaten zur Dosierung mit Dosierpumpen. Verhindert Kalkablagerungen. Dieses Medizinprodukt ist CE-zertifiziert (0481).

Anwendungsbereiche

Zur Reinigung von Steckbecken, Bettpfannen und Urinflaschen.

Anwendungshinweise

Die Vorschriften des Maschinenherstellers sind zu beachten. 1-5g/Liter bei ca. 50-90°C Anwendungstemperatur. Geeigneter Klarspüler: RHEOSOL-STK Steckbeckenklarspüler.

Anwendungskonzentrationen

Dosiervorgabe	Dosierangabe	Bemerkung
0-7° dH (weich)	1 – 2g / Liter	-
7-14° dH (mittel)	2 – 3g / Liter	-
14- 21° dH (hart)	3 – 4g / Liter	-
über 21° dH (sehr hart)	> 5g / Liter	-

Zusammensetzung

1-5% nichtionische Tenside, 1-5% amphotere Tenside, 5-15% NTA. Weitere Inhaltsstoffe: Dispergiermittel, Hilfsstoffe.

Physikalisch-chemische Daten

- pH-Wert (Anwendung) 10-12
- pH-Wert (Konzentrat) 13

Kennzeichnung gem. GHS

- H314 - Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- P280 - Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P301 + P330 + P331 - BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303 + P361 + P353 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305 + P351 + P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P314 - Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

Lieferformen

REF	Gebindegröße	Verpackungseinheit
22511050	RHEOSOL-STR Steckbeckenreiniger Kanister 5 Liter	Kanister

Zubehör

REF	Gebindegröße	Verpackungseinheit
48017002	Kanisterhahn Gewinde 51 für 5/10 Liter Kanister	Stück
48020002	Kanisterpumpe Gewinde 51 mm für 5/10 Liter UN-Kanister	Stück
48038005	Kanisterschlüssel für Verschluß mit Gewinde 51	Stück
48041001	Schutzbrille mit Seitenschutz, einzeln verpackt in Folie, mit Kunststoffglas	Stück
48036001	Schutzhandschuhe gelb, Größe S, 12 Paar im Paket	Packung
48036006	Schutzhandschuhe gelb, Größe M, 12 Paar im Paket	Packung
48036005	Schutzhandschuhe gelb, Größe L, 12 Paar im Paket	Packung
48036003	Schutzhandschuhe gelb, Größe XL, 12 Paar im Paket	Packung
48036002	Schutzhandschuhe blau Latex, säure- und alkaliefest, 12 Paar im Paket	Packung

Gutachten und Informationen

Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter → www.rheosol.com - individuelle Fragen oder Informationen zu Gutachten richten Sie bitte an unseren Innendienst: Telefon: 02241 - 3923-70 E-Mail: info@rheosol.de.

Zulassung

Dieses Medizinprodukt ist CE-zertifiziert (0481).

Umweltinformationen

Die Wachendorff-Chemie GmbH produziert nach fortschrittlichen, sicheren und umweltschonenden Verfahren unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards.